

Desinet-compact Koncentrátum

Folyékony, aldehidmentes tisztító- és fertőtlenítő koncentrátum

Tulajdonságok

A Desinet-compact a DGHM által bevizsgált tisztító- és fertőtlenítő koncentrátum. Aldehyd, fenol és szervesfémmentes. A felhasználása során alaposan tisztít, semleges illatú és a száradás során csúszásmentes. Hatékony, grampozitív és gramnegatív bakteriumok és gombák ellen. Vírusölő hatású (HIV, HBV, HCV).

Összetevők

100 g koncentrátumban lévő hatóanyagok:

7,0 g didecylidimethylammoniumklorid,

12,0 g N-(3-aminopropil)-N-dodecylpropan-1,3-diamin,

10,0 g 1- phenoxypropan-2-ol/2-phenoxypropanol.

További (a 648/2004/EK rendeletben szabályozott) hatóanyagok:

Nem ionos tenzidek 5-15 %, vízbázisú oldószerek.

pH-érték (koncentrátumban): kb. 9,5

pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7,5

Felhasználási terület

Felhasználható minden vízálló felületen és mozgatható berendezési tárgyon, kórházak különböző területein mint pl. intenzív osztály, műtő, fertőző osztály, idősok otthonában, óvodákban, fürdőrészeleknél, szaniter területeken, WC- és mosdókagylókon, zuhanyzófülkékben, öltözőben stb.. Bevont felületeken is alkalmazható. A linóleum felületek fertőtlenítés előtt bevonandóak.

Felhasználás

Tisztító-/súroló és felületfertőtlenítő szerként:

Kerülni kell a bőrrel való érintkezéssel! Megfelelő védőkesztyűt kell viselni! Adagolás: A megfelelő mennyiségű (lásd a táblázatot) Desinet-compact Koncentrátum-ot tartalmazó zacskó tartalmát maradéktalanul a megfelelő mennyiségű hideg vízhez adni. Fertőtlenítő tisztításnál a teljes felület benedvesítésére ügyelni kell (pl. 10 ml/m²). A segédész közöket alaposan tiszta vízzel tisztítani. A kifolyt koncentrátumot azonnal fel kell törölni és bő vízzel felmosni. A felhasználandó mennyiségek térfogat-százalékban (V-%) vannak megadva, a különböző hatóidőktől függően.



Felületfertőtlenítés Desinet-compact Koncentrátum-tal				
kórokozók terjedésének megakadályozása kórházon belül			hatékony vírusid* (beleértve: HIV, HBV, HCV) ellen	rotációs vírusok
nagy szerves megterhelés			nagy szerves megterhelés	
Hatóidő			Hatóidő	Hatóidő
5 perc	15 perc	4 óra	30 perc	15 perc
1%	0,5%	0,25%	0,25%	0,25%
4 zacskó (100 ml)	2 zacskó (50 ml)	1 zacskó (25 ml)	1 zacskó (25 ml)	1 zacskó (25 ml)
10 liter vízhez	10 liter vízhez	10 liter vízhez	10 liter vízhez	10 liter vízhez

*megfelel a Robert Koch Intézet (német Gesundheitsblatt) előírásainak


Fertőtlenítő tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Fertőtlenítő tisztítás: 0,10 ml

Felületfertőtlenítés: 0,10 ml

Felhasználása kizárólag az útmutató és termékleírás szerint.

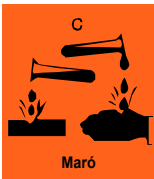

R 34

Égési sérülést okoz

S 26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 36/37/39

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni.

S 45

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni (ha lehetséges a címkét meg kell mutatni).

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

koncentrátumban

Kiszerezés

3/2 literes flakon kartonban

240 x 25 ml zacskóban

Kiehl-DosiExpress 25 ml

Cikkszám: j 35 03 08

Cikkszám: j 35 03 54

Cikkszám: z 12 15 12

